1 GUIDA

X TELETRASMISSIONE DIRETTA da Omron M6-comfort-IT a MISURIAMO (da eseguire solo la prima volta sul Vs PC)

- A. Creazione Account di BI-LINK
- B. Download del programma BI-LINK Gateway x teletrasmissione a Misuriamo
- C. Accettazione dei termini e concessione del permesso a teletrasmettere i vostri dati pressori

NB: per poter inviare <u>correttamente</u> i dati pressori a Misuriamo.com e al suo Medico è indispensabile dapprima procedere a <u>Due Operazioni Preliminari</u>

Operazione Preliminare impostare: anno/mese/ giorno/ora/minuti

selezionando il pulsante cerchiato in rosso (foto) e le freccette a fianco



Impostazione di data e ora

Impostare l'ora e la data corrette sul misuratore prima di eseguire la prima misurazione.

Premere il pulsante (B) per l'impostazione di data e ora ((C))

L'anno lampeggia sull'indicatore di data e ora (2).

Premere il pulsante < o ▶ per cambiare l'anno.

Premere il pulsante () per confermare l'anno; il mese lampeggia. Ripetere la procedura per modificare il mese, il giorno, l'ora e i minuti.



Operazione Preliminare 2

Impostare sempre la stessa posizione (ad es. n°1) per misurare le pressioni da teletrasmettere

Lasciare l'altra posizione (n°2) per eventuali misure ad altre persone.

NB: ricordarsi di controllare periodicamente che queste 2 funzioni (data/ora e selettore di posizione) rimangano correttamente impostate



<u>A Creazione Account di BI-LINK</u> Cliccare sul seguente link oppure copiarlo nel browser

http://bi-link.omron.com/Home/Landing e quindi cliccare sul pulsante arancione " Crea un account"



A Creazione Account di BI-LINK

Registrarsi inserendo i propri dati/indirizzo e-mail (lo stesso utilizzato per "misuriamo.com") e una Password a vostra scelta (semplice e non dimenticabile)

Nome	
]
Cognome	
Indirizzo e-mail	
Nome utente	
Password	
Conferma password	7
Paese	
United States •	
Lingua	
Italian (Italy)	
Fuso orario	
(GMT+01:00) West Central Africa	v
Quiz di matematica	
Quiz di matematica	

A Creazione Account di BI-LINK

accettare termini e condizioni

aese		
United States	v	
ingua		
Italian (Italy)	T	
^E uso orario		
(GMT+01:00) Amsterdam	, Berlin, Bern, Rome, Stockho	
Quiz di matematica		

B Download programma BI-Link-Gateway

x teletrasmettere a Misuriamo

ultimata la registrazione vi apparirà la seguente schermata: a centro pagina <u>Cliccare su"bi-Link</u> <u>Gateway software"</u>



<u>**B Download del programma BI-Link-Gateway**</u> <u>x trasmettere a Misuriamo</u>

Una volta scaricato Bi-Link Gateway, le verrà richiesto se desidera eseguire il file: fare clic su Yes (Sì).

Se non comparisse automaticamente, aprire il file dall'elenco dei download

B Download del programma BI-Link-Gateway

x trasmettere a Misuriamo

Il programma di installazione la guiderà attraverso le fasi necessarie per installare sul computer l'utilità di caricamento BI-LINK Gateway. Faccia più volte click su avanti (o next), quindi click su "installa" e infine su "fine"



<u>B Download del programma BI-Link-Gateway</u> <u>x trasmettere a Misuriamo</u>

Una volta installata l'utilità di caricamento BI-LINK Gateway <u>nel desktop del suo PC troverà una icona</u> <u>come in Figura (</u>da utilizzare in seguito per avviare lo scarico dei dati dal suo dispositivo)



<u>C Concessione del vostro permesso per</u> <u>teletrasmettere le misurazioni pressorie a</u> <u>Misuriamo</u>

al prossimo accesso in "misuriamo.com" (effettuato con la password di misuriamo), dovrà solo una volta concedere l'autorizzazione alla teletrasmissione dei suoi dati

misurati, come da figura

Frequenza Cardiaca:	
Email	@gmail.com
Mattino	
Sera	



<u>C Concessione del permesso per teletrasmettere i vostri</u> <u>dati pressori a Misuriamo</u>

Si aprirà una pagina Omron dove inserire le credenziali della registrazione a Bi-link (password DIVERSA da quella di Misuriamo)

Troverà quindi la seguente schermata: si accerti della <u>spunta su "Access your blood pressure data"; infine clicchi</u> <u>su "Allow" (permetti)</u>

OMRON



Le misurazioni che scaricate da M6-comfort-IT al Vostro Computer, <u>verranno d'ora in poi</u> <u>automaticamente teletrasmesse</u> a Misuriamo.com (visualizzabili dal vostro medico, quando collegato)

L'intera procedura qui descritta va eseguita solo la prima volta. Per lo scarico automatico delle volte successive, consultare la 1-Miniguida